


取扱説明書

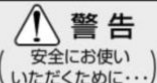

- ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読み下さい。
- この取扱説明書は必ず保管して下さい。


四点杖(多点杖)は、一点式の杖では重心が定まらず不安定な方のための杖です。下肢の筋力低下や麻痺、失調のために立位バランスの取りにくい方におすすめします。

特長

- 四点で支えるので安定感があり、歩行のバランスをとりやすいステッキです。
- 2.5cmピッチで9段階の調節が可能です。(64cm~84cm)
- グリップ部分には弾力性のあるカバーを使用しています、握りごちがよく、疲れにくいグリップです。
- 長さの調節ボタンが左右についています。ボタンの方向を変えることで右用・左用のどちらにも使用することができます。

長さ調節・グリップの向きの変え方

- ①上部シャフトの下に付いているシャフトロックをゆるめ、下部シャフトを抜きます。
- ②図の調節ボタンを使用する手(右・左)の手前側にくるようにセットします。
- ③長さを調節し、シャフトロックをしっかり締めます。

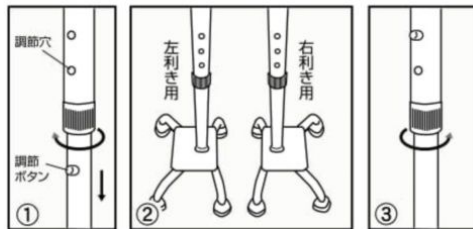

使用上の注意

- 長さ調節・グリップの向きの変え方を正しく理解した上でご使用ください。
- 身体にあった長さに調節してご使用下さい。不適切な長さで使用すると事故などの原因になり、危険です。
- ご使用前には必ず各部の点検をして下さい。万一、シャフトのキズ、先ゴムの異常などを見つけた時は、使用をやめて下さい。
- 使用後はシャフトを抜いて、水分や汚れを拭き取り、内部を乾燥させて下さい。そのまま放置すると内側が錆びて動きにくくなります。
- 使用後は屋内に保管して下さい。その際、高温・多湿の場所には置かないで下さい。
- やわらかな地面や、雪道、滑りやすいところでは使用しないで下さい。また杖を斜めについたり、段差のあるところで使用することは、バランスをくずし大変危険ですのでおやめ下さい。
- 用途以外のご使用はおやめ下さい。

各部の名称と仕様



長さ	
ベースの大きさ	
重量	
材質	シャフト
	ベース
	先ゴム
	グリップカバー
生産国	



発売元 **フジホーム株式会社**
〒104-0033 東京都中央区新川2-12-15-7F
TEL.03-3523-1631

ホームページURL <http://www.fujihome.co.jp>

四点杖



取扱説明書

●ステッキは、ステッキなしで自立歩行できる人がより安定して歩行できるよう、補助的に使用するものです。体重を掛け過ぎると、かえって肩や手を痛めることもある為、次の場合は使用に適用しません。(また、次のような状態になった場合は使用を中止してください。)

- ①ステッキなしでは歩行できない方の使用
(手すりに伝わらなければ歩行できない方や、介助者に手伝ってもらわなければ歩行できない方の使用が含まれます。)
- ②リハビリ中などのように、体重の一部を支えないと歩行できない方。(ただし、医師などの指導のもとでの使用は含みません。)

非課税

※この商品は居宅要介護者等について行われる福祉用具貸与対象商品です。

