

取扱説明書



警告

(安全にお使い
いただくために...)

- ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読み下さい。
- この取扱説明書は必ず保管して下さい。


四点杖(多点杖)は、一点式の杖では重心が定まらず不安定な方のための杖です。下肢の筋力低下や麻痺、失調のために立位バランスの取りにくい方におすすめします。

特
長

- 四点で支えるので安定感があり、歩行のバランスをとりやすいステッキです。
- 補助グリップが付属されていて、両手を使うので立ち上がり時に便利です。
- 2.5cmピッチで8段階の調節が可能です。(約64cmから82cm)
- グリップ部分には弾力性のあるエラストマー樹脂を使用していますので、握ごちがよく、疲れにくいグリップです。
- 長さの調節ボタンが左右についています。ボタンの方向を変えることで右用・左用のどちらにも使用することができます。

長さ調節・グリップの向きの変え方

- ①ポールの下に付いているストッパーをゆるめ、シャフトを回転します。
- ②図の調節ボタンを使用する手(右・左)の手前側になるようにセットします。
- ③長さを調節し、ストッパーをしっかり締めます。

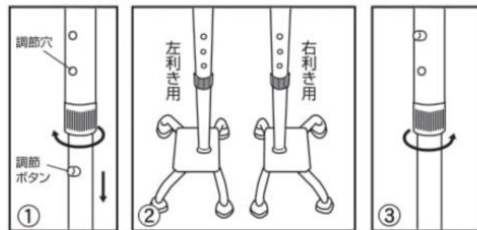

使用上の注意

- 長さ調節・グリップの向きの変え方を正しく理解した上でご使用ください。
- 身体にあった長さに調節してご使用下さい。不適切な長さで使用すると事故などの原因になり、危険です。
- ご使用前には必ず各部の点検をして下さい。万一、シャフトのキズ、先ゴムの異常などを見つけた時は、使用をやめて下さい。
- 使用後はシャフトを抜いて、水分や汚れを拭き取り、内部を乾燥させて下さい。そのまま放置すると内側が錆びて動きにくくなります。
- 使用後は屋内に保管して下さい。その際、高温・多湿の場所には置かないで下さい。
- やわらかな地面や、雪道、滑りやすいところでは使用しないで下さい。また杖を斜めについたり、段差のあるところで使用することは、バランスをくずし大変危険ですのでおやめ下さい。
- 用途以外(例えば、登山用・護身用等)のご使用はおやめ下さい。
- 補助グリップを使用する際、折畳式(パネ)になっているのでシャフトとの間に手や指をはさまないようにして下さい。

各部の名称と仕様



長さ	シャフト	
ベースの大きさ		
重さ		
材質	シャフト部分	アルミニウム
	補助グリップ	ナイロン
	ベース部分	アルミニウム
	先ゴム	合成ゴム
	グリップ	エラストマー
生産国	台湾	



発売元 **フジホーム株式会社**

〒104-0033 東京都中央区新川2-12-15
ヒューリック八丁堀ビル7F TEL03-3523-1631

ホームページURL <http://www.fujihome.co.jp>

四点杖 補助グリップ付



取扱説明書

●ステッキは、ステッキなしで自立歩行できる人がより安定して歩行できるよう、補助的に使用するものです。体重を掛け過ぎると、かえって肩や手を痛めることもある為、次の場合は使用に適しません。(また、次のような状態になった場合は使用を中止してください。)

- ①ステッキなしでは歩行できない方の使用
(手すりに伝わらなければ歩行できない方や、介助者に手伝ってもらわなければ歩行できない方の使用が含まれます。)
- ②リハビリ中などのように、体重の一部を支えないと歩行できない方。(ただし、医師などの指導のもとでの使用は含みません。)

非課税

※この商品は居宅要介護者等について行われる福祉用具貸与対象商品です。

Fuji Home